



### **Mega-Glanz**

**Mega-Glanz** ergibt auf Kunststoff- und Metallarbeiten sowie kombinierten Kunststoff/Metallarbeiten (z. B. Verblendbrücken) dauerhaften Hochglanz. Mega-Glanz beseitigt eventuell anhaftende Reste von Vorpolier- und Polierpasten.  
Anwendung: Vorpolieren wie gewohnt. Dann die Prothese mit Mega-Glanz benetzen und mit Wollschwabbel o.ä. polieren. Anschließend unter Wasser abspülen. Vor Gebrauch schütteln!

**Mega-Glanz** is a special polishing agent for combined acryl/metal works.

Application: Pre-polishing as usual. Moisten the denture and the polish wheel with Mega-Glanz. Polish with the port polisher or a polish wheel. Rinse off with water. Shake well before using!